

medco GBS-Medium



Bereits geringste Farbspuren im GBS-Medium stellen einen positiven Befund dar. Bei geringer Keimzahl (+) sind oft nur kleine orange Pünktchen zu erkennen. Bei hohen Keimzahlen (+++) ist meistens das ganze Medium orange gefärbt.



Beim Ablesen des GBS-Mediums auch den Röhrchenboden von unten inspizieren. Bei geringer Keimzahl ist nach 24 Stunden Inkubation die Orangefärbung häufig zuerst nur am Tupfer sichtbar (siehe Pfeile)